


Provtagningsanvisning Elektrofores

| | |
|------------------|---|
| | |
| Provtagning | <p>Serumrör, röd eller gul kork</p>  <p>Vagga provet lite efter provtagning.</p> <p>Centrifugera helst provet efter 30 min i rumstemperatur och avskilj sedan serum till litet plaströr utan tillsats.</p> |
| Provmängd | Minst 200 µl avskilt serum krävs för analys. |
| Provmärkning | Märk vänligen rör med patient-ID, t.ex. journalnummer och djurets namn. |
| Förvaring | Avskilt serum förvaras vid 4-8°C. Vid längre tids förvaring kan serum frysas. Helblod förvaras vid 4-8°C och får inte frysas. |
| Hållbarhet | 4 dagar i rumstemperatur. Specifika avvikelser, t ex förekomst av poly- eller monoklonal gammopati, kan bedömas på prover som förvarats upp till 7 dagar. Vid längre tids förvaring, frys provet. Ange på remissen hur länge provet förvarats i kyl eller frys samt när provet postats. |
| Transport | Skicka provrören i provrörshylsor. |
| Svarstid | Analysen utförs endast onsdagar. Svar erhålles onsdag eller torsdag. |
| Övrig upplysning | Ange gärna anamnes på remissen. |