


Provtagningsanvisning Elektrofores

Remiss	Remiss kemi- och hematologianalyser
Provtagning	<p>Serumrör, röd eller gul kork</p>  <p>Vagga provet lite efter provtagning.</p> <p>Centrifugera helst provet efter 30 min i rumstemperatur och avskilj sedan serum till litet plaströr utan tillsats.</p>
Provmängd	Minst 200 µl avskilt serum krävs för analys.
Provmärkning	Märk vänligen rör med patient-ID, t.ex. journalnummer och djurets namn.
Förvaring	Avskilt serum förvaras vid 4-8°C. Vid längre tids förvaring kan serum frysas. Helblod förvaras vid 4-8°C och får inte frysas.
Hållbarhet	4 dagar i rumstemperatur. Specifika avvikelser, t ex förekomst av poly- eller monoklonal gammopati, kan bedömas på prover som förvarats upp till 7 dagar. Vid längre tids förvaring, frys provet. Ange på remissen hur länge provet förvarats i kyl eller frys samt när provet postats.
Transport	Skicka provrören i provrörshylsor.
Svarstid	Analysen utförs endast onsdagar. Svar erhålles onsdag eller torsdag.
Övrig upplysning	Ange gärna anamnes på remissen.