


Provtagningsanvisning Fibrinogen

Remiss	Remiss hemostasanalyser eller Remiss kemi- och hematologianalyser
Provtagning	<p>EDTA-rör, lila kork.</p>  <p>Fyll röret upp till markeringen på röret. Centrifugera helst provet och avskilj sedan plasman till litet plaströr utan tillsats. Ange på rör och remiss att det är EDTA-plasma.</p>
Provmängd	Fyll röret upp till markeringen på röret.
Provmärkning	Märk vänligen rör med patient-ID, t.ex. journalnummer och djurets namn.
Förvaring	Avskild plasma förvaras vid 4-8°C. Vid längre tids förvaring kan plasma frysas. Helblod förvaras vid 4-8°C och får inte frysas.
Hållbarhet	7 dagar i rumstemperatur.
Transport	Skicka provrören i provrörshylsor.
Svarstid	Provsvar erhålls oftast samma vardag provet ankommer laboratoriet, alternativt dagen efter.
Övrig upplysning	