


## Provtagningsanvisning Hematologianalyser

Provtagning	<p>EDTA-rör, lila kork</p>  <p>Viktigt att vaggas provet vid provtagning, för att undvika koagel.</p> <p>Bifoga ett blodutstryk gjort på färskt EDTA-blod. <a href="#">Instruktion för blodutstryk.</a></p>
Provmängd	<p>Fyll röret till markeringen. Minst 500 µl EDTA-blod krävs för analys.</p>
Provmärkning	<p>Märk rör och objektglas med patient-ID, t.ex. journalnummer och djurets namn.</p>
Förvaring	<p>EDTA-provet förvaras vid 4-8°C. Provet får inte frysas.</p> <p>Blodutstryk förvaras i rumstemperatur.</p>
Hållbarhet	<p>Resultaten från hematologianalys påverkas av förvaring, t.ex. genom att erytrocyterna sväller över tid vilket leder till falskt högt EVF. Värdefull diagnostisk information kan ändå erhållas från prover som förvarats i rumstemperatur i upp till 7 dagar. Blodutstryk påverkas ej av förvaring.</p>
Transport	<p>Skicka provrören i provrörshylsor och objektglasen i objektglasaskar.</p>
Svarstid	<p>Provsvar erhålls oftast samma vardag som provet ankommer laboratoriet, alternativt dagen efter.</p>
Övrig upplysning	<p>Ange gärna anamnes på remissen.</p>