


Provtagningsanvisning Hematologianalyser

Remiss	Remiss kemi- och hematologianalyser
Provtagning	<p>EDTA-rör, lila kork</p>  <p>Viktigt att vaggas provet vid provtagning, för att undvika koagel.</p> <p>Bifoga ett blodutstryk gjort på färskt EDTA-blod. Instruktion för blodutstryk.</p>
Provmängd	Fyll röret till markeringen. Minst 500 µl EDTA-blod krävs för analys.
Provmärkning	Märk rör och objektglas med patient-ID, t.ex. journalnummer och djurets namn.
Förvaring	EDTA-provet förvaras vid 4-8°C. Provet får inte frysas. Blodutstryk förvaras i rumstemperatur.
Hållbarhet	Resultaten från hematologianalys påverkas av förvaring, t.ex. genom att erytrocyterna sväller över tid vilket leder till falskt högt EVF. Värdefull diagnostisk information kan ändå erhållas från prover som förvarats i rumstemperatur i upp till 7 dagar. Blodutstryk påverkas ej av förvaring.
Transport	Skicka provrören i provrörshylsor och objektglasen i objektglasaskar.
Svarstid	Provsvar erhålls oftast samma vardag som provet ankommer laboratoriet, alternativt dagen efter.
Övrig upplysning	Ange gärna anamnes på remissen.